

# WILAméd

*Equipment for Professionals*



## Comfort Cough<sup>®</sup> Plus

[www.wilamed.com](http://www.wilamed.com)

Mechanischer  
In- und Exsufflator  
**plus** Perkussionsmodus



# Comfort Cough® Plus – Bewährtes wird noch besser

Der mechanische In- und Exsufflator (MI-E) Comfort Cough® Plus dient dazu, um betroffenen Patienten das natürliche Abhusten von Bronchialsekreten zu erleichtern. Dies wird erreicht durch die Applizierung einer kurzen Reihenfolge von Über- und Unterdruck auf die Atemwege des Patienten. Durch diesen schnellen Druckwechsel wird der Atemfluss erhöht, was das natürliche Abhusten nachempfindet. Comfort Cough® Plus eignet sich für Patienten mit Störungen der Lungenfunktion in Verbindung mit einer Beeinträchtigung beim Abhusten von Bronchialsekret.

## Innovative Merkmale

Neue Funktionen und Verbesserungen für ein komfortableres Mobilisieren und Entfernen von Bronchialsekret im klinischen und im häuslichen Pflegebereich. Zur invasiven und nicht invasiven Anwendung bei Kindern und Erwachsenen.

## Indikationen

- Poliomyelitis
- Muskeldystrophie
- Spinale Muskelatrophie
- Amyotrophe Lateralsklerose
- Myasthenia Gravis
- Guillain-Barré-Syndrom
- Multiple Sklerose
- Emphysem
- Zystische Fibrose (Mukoviszidose)
- Bronchiektase
- Rückenmarksverletzungen
- oder andere neurologische Störungen mit Lähmungserscheinungen der Atemmuskulatur





## Großes Farbdisplay

für mehr Informationen zum Therapieverlauf




## Drei verschiedene Modi

für individuell einstellbare Therapievorgaben je nach Patientenanforderung

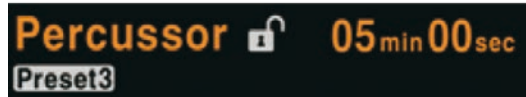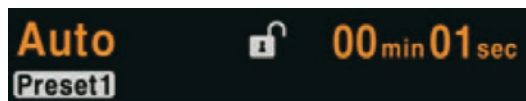

## Perkussionsmodus **NEU**

In diesem Modus wird das unter der Körperoberfläche liegende Gewebe in Schwingungen versetzt und hilft somit das festsetzende Bronchialsekret schonend und wirksam zu lösen.

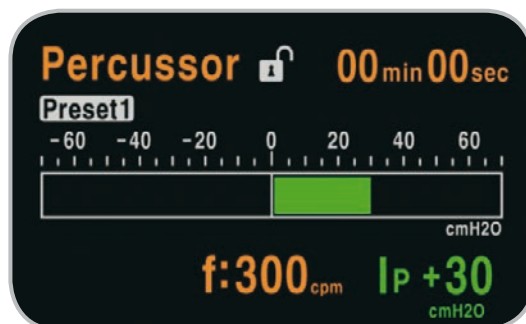

## PercussionWrap

Der optional erhältliche Thoraxgürtel dient zur äußerlichen Unterstützung bei der Mobilisierung des Bronchialsekrets.



## Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
100.649	Comfort Cough® Plus Grundgerät
100.651	Comfort Cough® Gerätewagen
100.655	Tragetasche
270.349	BTS349 Schlauchsystem mit Maske für Erwachsene
270.347	BTS810 Schlauchsystem für Erwachsene
270.348	BTS253 Schlauchsystem mit Maske für Kinder
100.657	PercussionWrap (Thoraxgürtel), Größe M
100.658	PercussionWrap (Thoraxgürtel), Größe S
100.656	PercussionWrap (Thoraxgürtel), Größe L
400.016	Geräteeinlassfilter
270.866	Adapter für Schlauchsystem

## Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V

Pos.-Nr.	Bezeichnung
14.24.08.3005	Comfort Cough® Plus Modellbezeichnung SICC2001Plus Artikel-Nr. 100.649



## Technische Daten

<b>Eingangsspannung:</b>	100~240 VAC, 50/60 Hz
<b>Eingangsleistung:</b>	230 VA
<b>Abmessung in mm:</b>	280 x 212 x 330
<b>Gewicht in kg:</b>	6,4
<b>Insufflations-/Exsufflationsdruck:</b>	Einstellweite: +0,5 ~ +60 cmH <sub>2</sub> O in Schritten von 1,0 cmH <sub>2</sub> O
<b>Insufflationsfluss:</b>	198 L/min bei minimaler Einstellung, bei maximaler Einstellung gleich Exhalationsfluss
<b>Exsufflationsfluss:</b>	600 L/min; der tatsächliche Flow hängt vom eingestellten Druck und dem Widerstand in den Atemwegen ab <ul style="list-style-type: none"><li>• Einstellweite 0,5 ~ 5,0 s in Schritten von 0,1 s</li><li>• Eingabe der Pausendauer (nur im Automatikmodus)</li><li>• Einstellweite 0 ~ 5,0 s in Schritten von 0,1 s</li></ul>
<b>Betriebsart:</b>	Automatik, Manuell oder Perkussion
<b>Gebälsetyp:</b>	Zweistufiges Zentrifugalgebläse mit bürstenlosem Gleichstrommotor

### Vertrieb durch:

## WILAméd GmbH

Medizinische Geräte und Zubehör

Gewerbepark Barthelmesaurach  
Aurachhöhe 5–7  
91126 Kammerstein (Germany)

Phone: +49 9178 996999-0  
Fax: +49 9178 996778  
info@wilamed.com  
www.wilamed.com

